



MASCARILLA HIGIÉNICA  
HYGIENIC HALF MASK

FICHA TÉCNICA  
DATASHEET



708-N



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



## HIGIÉNICA

### MASCARILLA

### HYGIENIC HALF MASK

#### Descripción

#### Description

#### Características

#### Characteristics

**CORONAVIRUS**  
Covid-19



Las **maskarilla higiénica Climax** está destinada a personas adultas sin síntomas que tienen que salir a la calle para disminuir el riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social.

**Climax hygienic mask** is intended for adults without symptoms who have to go outside to reduce the risk due to the impossibility of maintaining social distance.

#### Tolerancia cutánea

Minimiza el riesgo de alergias al estar libre de látex y carente de fibras de vidrio.

#### Skin tolerance

Minimizes the risk of allergies by being latex-free and free of glass fibers.

#### Facilidad de respiración

La mascarilla se ha fabricado con un material de alta protección y baja resistencia a la respiración.

#### Ease of breathing

The mask has been manufactured with a material of high protection and low resistance to breathing.

#### Capa interna

Extremadamente suave por la parte en contacto con el usuario proporcionando una gran comodidad durante todo su tiempo de uso.

#### Inner layer

Extremely soft on the part in contact with the user, providing great comfort throughout its time of use.

#### Bandas de ajuste

Sintéticas, no contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

#### Adjustment bands

Synthetic, does not contain materials made of natural rubber (latex). Stapleless, single ring.

#### Clip nasal

Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

#### Nasal clip

Easy to adjust to provide the most protection throughout the day.

**NR:** No reutilizable

**NR:** Not reusable

**Embalaje:** 20 unidades/caja

**Packaging:** 20 units/box

## HIGIÉNICA MASCARILLA HYGIENIC HALF MASK

### Ensayos Test

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)  
Bacterial filtration efficiency (BFE) (%)

**Resultados**  
**Results**

**96,16 ± 2,08**

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm<sup>2</sup>)  
Breathability: Differential pressure (Pa/cm<sup>2</sup>)

**Promedio ± DS**  
**Average ± SD**


**32,8 ± 1**

Clip nasal  
ajustable  
Adjustable  
nose clip



Bandas de  
ajuste sintéticas  
Setting synthetic  
bands

Material  
interior suave  
Soft inner  
material

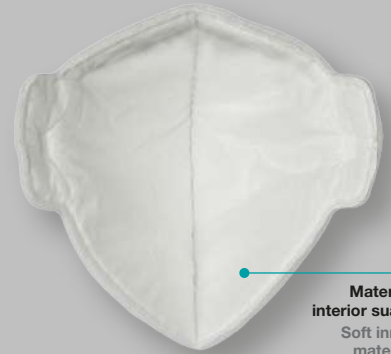

### Limitaciones de uso Use limitations

#### Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de esta mascarilla, ésta debe ser desechada tras su uso ya que no es reutilizable.

#### Mask removal

To reduce the risks of using this mask, it must be discarded after use as it is not reusable.

#### Procedimientos para desechar la mascarilla

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual).

Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior.

#### Procedures for disposing of the mask

Masks should be discarded in a container provided with a plastic bag (preferably with a lid and non-manual control).

It is recommended to use a double bag to preserve the contents of the first bag in case of tearing of the outer bag.

#### Duración de uso máximo recomendado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

#### Recommended maximum duration of use

For comfort and hygiene reasons, it is recommended not to wear the mask for more than 4 hours.

In case it gets wet or deteriorates from use, it is recommended to replace it with a new one.

Durante el mismo período de 4 horas, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

During the same 4-hour period, the mask can only be used multiple times if it is removed according to the instructions, temporarily stored, or hung to provide the least possible contact and repositioned according to the instructions.

## HIGIÉNICA

### MASCARILLA


### HYGIENIC HALF MASK

#### Colocación

#### Fitting

#### Especificaciones

#### Specification

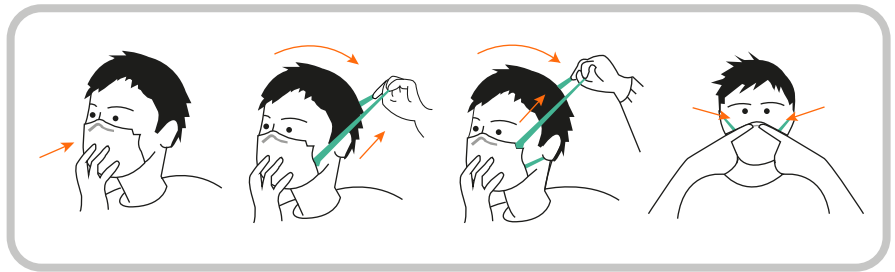

Especificación UNE 0064-1:2020. Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

Parte 1: para uso en adultos.

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Specification UNE 0064-1:2020. Not reusable hygienic masks. Material, design, manufacturing, marking and use requirements.

Part 1: for adult use.

This device is not a medical device in accordance with Directive 93/42 or Regulation EU/2017/745, nor a personal protective equipment in accordance with the Regulation EU / 2016/425.